



SCANLAB¹



Système de gestion de sérothèque sur tubes primaires

ADAPTABILITÉ

Complémentaire à tous les systèmes analytiques
(chaînes, îlots...)

PRODUCTIVITÉ

Positionnement des échantillons en sérothèque
simple et rapide

TRAÇABILITÉ

Logiciel complet de sérothèque (stockage, recherche,
sorties, mises aux déchets...)

STOCKAGE

Organisation et optimisation de vos espaces de
stockage

SCANLAB¹

Scanlab1 est un système complet de gestion de sérothèque pour tubes primaires à gel ou tubes décantés (aliquoteur chaîne...)

SYSTÈME OUVERT

ADAPTABLE À TOUS LES LABORATOIRES

- **Faible encombrement**
- **Adaptation** à vos CB et vos tubes (7mL, 5mL...)
- **Connexion informatique SIL ou Middleware**
 - mono-directionnelle (réception démographie patient)
 - bi-directionnelle (renvoi acquittement dossier et localisation en sérothèque)
- **Sauvegardes et archivages** automatiques des données
- **Édition d'une liste de travail**

SYSTÈME SCANLAB1 ET ACCESSOIRES

UNE OFFRE ADAPTÉE À VOS BESOINS

- **Scanlab1** : automate, PC, logiciel et douchette sans fil
- **Supports de stockage** : portoirs Concept-pro adaptés à vos tubes (7mL, 5mL...). Capacité 40 tubes
- **Solutions stockage (au choix)** :
 - kit chambre froide Concept-pro
 - kit congélateur Concept-pro
 - réorganisation espaces de stockage existants
- **PDA WIFI (option)** : scanner CB permettant de réaliser à distance les opérations de traçabilité



- *Pas de consommables*
- *Gain de temps opérateur*
- *Organisation de vos espaces de stockage*

MODE OPÉRATOIRE

SIMPLE, RAPIDE ET SÉCURISÉ

- **Remplissage aléatoire** des portoirs Concept-pro
- **Pré-stockage** : attribution automatique du positionnement des échantillons sur le portoir par lecture CB sur Scanlab1
- **Stockage** : enregistrement automatique de la localisation d'un portoir directement dans l'espace de stockage choisi par lecture CB grâce au PDA WIFI (ou douchette sans fil)
- **Recherche** : localisation immédiate et précise d'un échantillon (ex : Congélateur CO1 ; Rayonnage R02 ; Portoir 0001 ; emplacement 25)
- **Traçabilité** : identification des motifs de sortie et destinataires (si envoi extérieur)
- **Mise aux déchets automatique** : à l'issue de la ou des dates de péremption des échantillons
- **Historique des opérations** : consultable par échantillon avec opérateur, date et heure



1. JE SCANNE LE PORTOIR

Scanner PDA Wifi



2. JE SCANNE LE RAYONNAGE



3. JE SCANNE LE CONGÉLATEUR

STOCKAGE TERMINÉ !

CONCEPT PRO
Études Prototypes Industrialisation

18 rue Lesage
87000 Limoges
Tél. : +33 (0)5 55 31 20 67
Fax : +33 (0)5 67 07 12 37
www.concept-pro.fr
contact@concept-pro.fr